

 PUSKESMAS TANAH HABANG 		Kepala Puskesmas Tanah Habang	
SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH		<u>Nurhilaliyah, SKM</u> NIP. 19721215 199301 2 001	
No. Dokumen :		No. Revisi:	
Tanggal Terbit :		Halaman:	
Pengertian	Jenis darah yang ada pada manusia (A, B, O, AB)		
Tujuan	Sebagai acuan untuk mengetahui golongan darah seseorang di Puskesmas Tanah Habang.		
Kebijakan			
Referensi			
Prosedur/ Langkah- langkah	1. Pra Analitik Prinsip : Golongan darah diidentifikasi dengan melihat aglutinasi yaitu penggumpalan sel darah merah akibat reaksi antara antibodi dalam serum/plasma dengan antigen pada sel darah merah Alat : 1. Kartu golongan darah 2. Pengaduk kaca 3. Lancing device 4. Alkohol 70% 5. Kapas Reagen : 1. Larutan anti sera A, B. Bahan: Darah Kapiler Darah/ Darah Vena dengan Antikoagulan EDTA		
	II. Analitik 1. Siapkan objek glass yang bersih dan kering. 2. Bersihkan ujung jari (tumit pada bayi) pasien. Dengan kapas alkohol 70%. Biarkan kering sendiri. 3. Peganglah bagian yang akan ditusuk supaya tidak bergerak dan tekan sedikit. Tusuk dengan lancet steril sedalam kira-kira 3 mm. Darah harus keluar dengan sendirinya tanpa harus diperas. 4. Tetesan darah pertama dihapus dengan kapas kering dan tetesan berikutnya dapat dipergunakan untuk pemeriksaan. 5. Letakkan ujung jari pasien yang berdarah pada objek gelas pada bagian kiri dan kanan.		

6. Teteskan pada darah yang kiri dengan reagen Anti A dan darah yang sebelah kanan ditetaskan reagen anti B secara terpisah.
7. Campur dengan baik bantuan pengaduk, kemudian goyang selama 2 menit.
8. Lihat adanya aglutinasi.

III. Pasca Analitik

A. Interpretasi Hasil




Interpretasi Hasil Golongan Darah

Keterangan :


- Golongan darah A : terdapat aglutinasi pada tetesan darah yang diberi reagen anti A
 Golongan darah B : terdapat aglutinasi pada tetesan darah yang diberi reagen anti B
 Golongan darah AB : terdapat aglutinasi pada tetesan kedua darah tersebut
 Golongan darah O : tidak ada aglutinasi pada kedua tetesan darah tersebut.

Unit Terkait	
Dokumen Terkait	

ALUR KEGIATAN

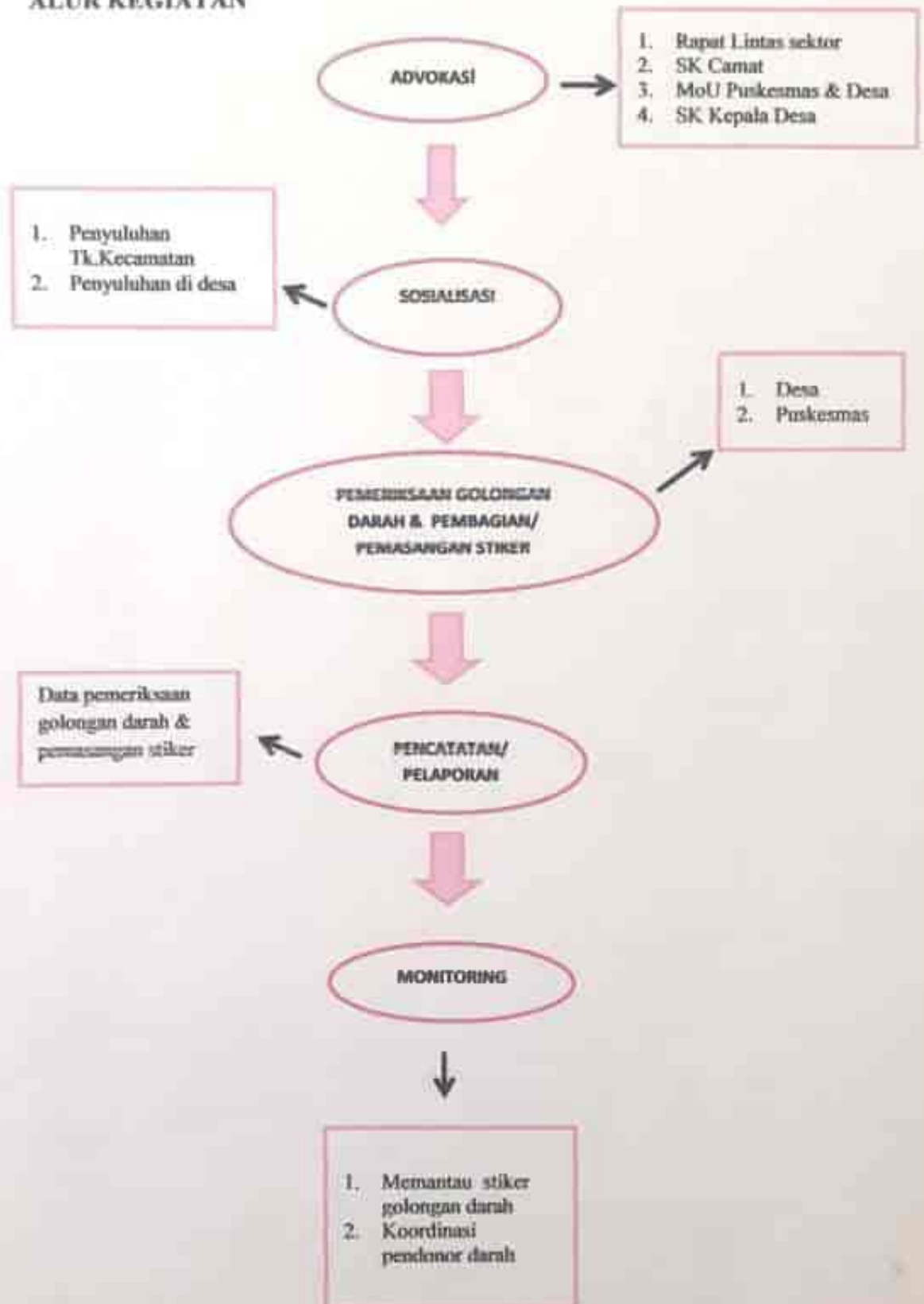

KEGIATAN DI LAPANGAN

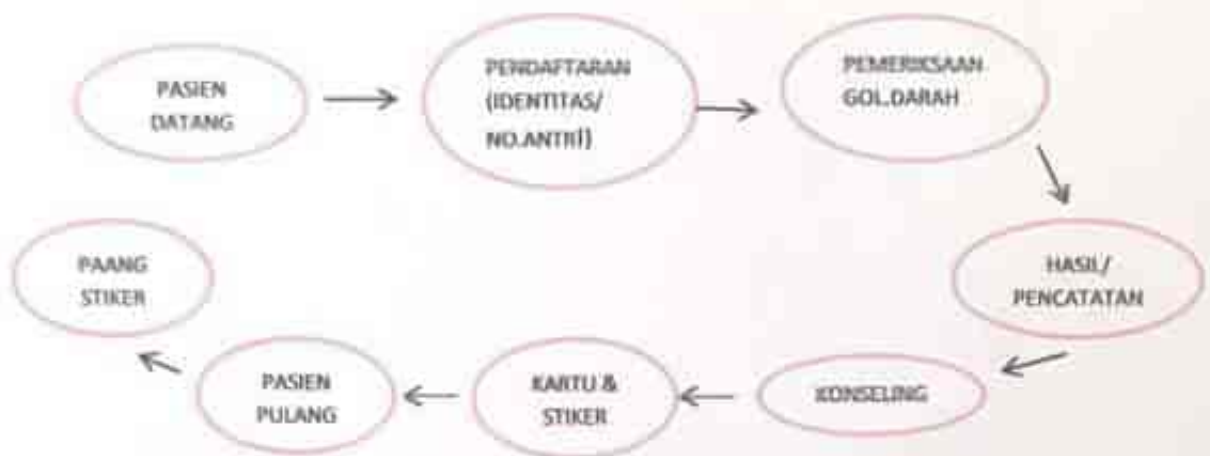

KEGIATAN DI PUSKESMAS





Masyarakat yang datang ke Puskesmas untuk memeriksakan golongan darah dilayani sesuai dengan SOP alur pelayan Puskesmas.

KARTU GOLONGAN DARAH

LABORATORIUM PUSKESMAS TANAH HABANG Jl. Raya Lumphong KM 20 Kec. Lumphong Kab. Huluayan	LABORATORIUM PUSKESMAS TANAH HABANG Jl. Raya Lumphong KM 20 Kec. Lumphong Kab. Huluayan
Nama : TTL : Pekerjaan : Alamat : Golongan Darah : Tanah Habang 20 Petugas Laboratorium	Nama : TTL : Pekerjaan : Alamat : Golongan Darah : Tanah Habang 20 Petugas Laboratorium
A	B

LABORATORIUM PUSKESMAS TANAH HABANG Jl. Raya Lampihong KM 20 Kec. Lampihong Kab. Bulungan		LABORATORIUM PUSKESMAS TANAH HABANG Jl. Raya Lampihong KM 20 Kec. Lampihong Kab. Bulungan	
Nama	:	Nama	:
TTL	:	TTL	:
Pekerjaan	:	Pekerjaan	:
Alamat	:	Alamat	:
Geleugun Darah	:	Geleugun Darah	:
Tasah Habang	:	Tasah Habang	:
Petugas Laboratorium	:	Petugas Laboratorium	:
O		AB	

STIKER GOLONGAN DARAH

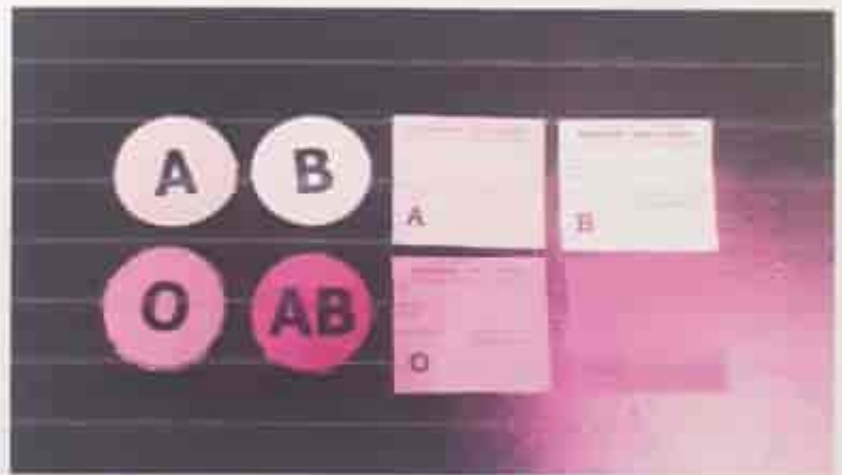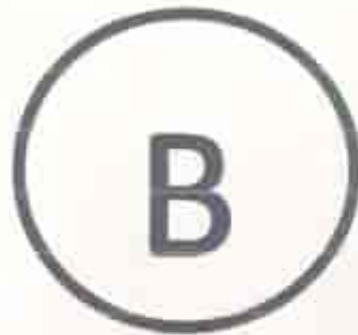

JADWAL KEGIATAN TAHUN 2017 (Desa Jimamun)

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Advokasi		X										
2	Sosialisasi			X									
3	Pemeriksaan Golongan Darah & Pembagian/ Pemasangan Stiker				X	X	X	X	X	X	X		
4	Pencatatan				X	X	X	X	X	X	X		
5	Monitoring								X	X	X	X	

RENCANA KERJA TAHUN 2018 (Desa Tanah Habang Kanan)

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Advokasi		X										
2	Sosialisasi			X									
3	Pemeriksaan Golongan Darah & Pembagian/ Pemasangan Stiker				X	X	X	X	X	X	X		
4	Pencatatan				X	X	X	X	X	X	X		
5	Monitoring								X	X	X	X	

RENCANA KERJA TAHUN 2019 (Desa matang Lurus)

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Advokasi		X										
2	Sosialisasi			X									
3	Pemeriksaan Golongan Darah & Pembagian/ Pemasangan Stiker				X	X	X	X	X	X	X		
4	Pencatatan				X	X	X	X	X	X	X		
5	Monitoring								X	X	X	X	